

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ, ЛОКТЕВОЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ



Прочная и гигиеническая конструкция.

Ключ для открытия крышки и запасное уплотнение поршня.



Диспенсер можно прикрепить на стену или заказать вместе со стендом из нержавеющей стали. Стенд обладает стабильной и прочной конструкцией, а также местом для размещения информации для пользователя. Его можно разместить где угодно.

В предложении находятся также станции дозирования для объектов с высокой интенсивностью использования, в которых дезинфектор берется из канистры, 5л, 10л или 25л, которые находятся в закрытых корзинах.



ДОЗИРОВКА 2 мл, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ДО 1 мл




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



для жидкостей и гелей для дезинфекции, содержащих алкоголь

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАПОЛНЕНИЮ БУТЫЛКИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ, ЛОКТЕВОЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ

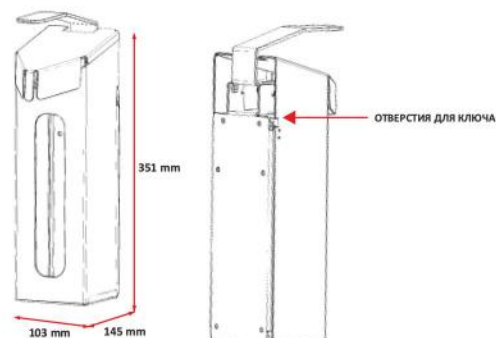

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



1950 g



8 шт. в мультипаке/160 шт. на паллете



МОЖНО ПОМЕСТИТЬ СВОЮ БУТЫЛКУ
РАЗМЕРОМ 95 x 88 x 250 мм



ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ АЛКОГОЛЬ



СНЯТИЕ КРЫШКИ ДИСПЕНСERA



УДАЛИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ




ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ОТВЕРСТИЯ НА
ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ДИСПЕНСERA
ОТПУСТИТЕ ЗАМОК



ПЕРЕМЕСТИТЕ КРЫШКУ
ВВЕРХ



ПЕРЕМЕСТИТЕ КРЫШКУ
ОТ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

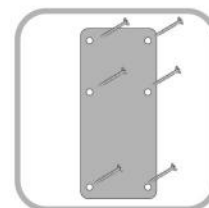

ЗАКРЕПИТЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ
НА СТЕНЕ




НАПОЛНИТЕ БУТЫЛКУ
ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРОВЕРЬТЕ ЭТИКЕТКУ
ВСТАВЬТЕ БУТЫЛКУ В ДИСПЕНСЕР




ДОЗИРОВКА 2 мл
ОГРАНИЧИТЬ ДО 1 мл
ВСТАВИТЬ ЗАМОК



ЗАКРЕПИТЕ КРЫШКУ
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО К ОСНОВЕ
ДИСПЕНСERA С ПОМОЩЬЮ КРЮЧКОВ

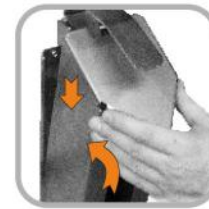

НАЖМИТЕ ЗАМОК

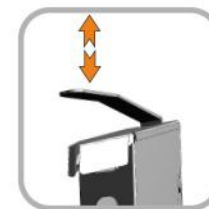

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАЖМИТЕ РЫЧАГ НЕСКОЛЬКО РАЗ
ЧТОБЫ ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ